

Dein Termin

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Vorbereitung auf den CGM-Termin

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung für das Eversense® System zur kontinuierlichen Glukosemessung.

Vor Deinem Insertionstermin

- Lade die Eversense App aus dem Apple App Store® bzw. Google Play™ Store auf Dein kompatibles Smartphone.
- Starte die App und erstelle Dir für das optimale Nutzererlebnis ein Eversense-Konto.
 - Wähle im Begrüßungsbildschirm die Option „Ich habe keinen Smart Transmitter“.
 - Wähle die Einheit (mg/dl oder mmol/l), in der Du zukünftig mit Deinem Eversense messen wirst.

Am Tag Deines Insertionstermins

- Trage zu Deinem Termin ein lockeres, ärmelloses oder kurzärmeliges Oberteil.
- Bringe bitte Folgendes mit:
 - Dein Smartphone, voll aufgeladen und mit installierter Eversense App.
 - Falls vorhanden: Benutzername (E-Mail-Adresse) und Kennwort für Dein Eversense-Konto
- Um die Insertionsstelle voll ausheilen zu lassen, solltest Du es in den ersten fünf Tagen vermeiden, zu baden, zu schwimmen und anstrengende Aktivitäten zu unternehmen.
- Lies Dir vor der Verwendung des Eversense CGM Systems die Bedienungsanleitung vollständig durch und befolge unbedingt die Anweisung Deines Arztes.

DAS EINZIGE LANGZEIT-CGM SYSTEM MIT NUR EINEM SENSOR, DER FAST 6 MONATE HÄLT.

- Kein wöchentlicher oder zweiwöchentlicher Sensorwechsel
- Kein versehentliches Verrutschen des Sensors
- Keine Verschwendung von Sensoren durch abgerissene und ersetzte Transmitter
- Keine ständige Beschaffung und Mitnahme von Verbrauchsmaterialien
- Keine Pflaster, die 14 Tage halten müssen



Eversense App

Jetzt kostenfrei laden und auf Deinen Termin vorbereiten.



WIR SIND FÜR DICH DA.

Telefon
0800 / 50 88 844
(kostenfrei, Mo - Fr, 8 bis 18 Uhr)

E-Mail
eversense.de@ascensia.com

Das Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System ist für die kontinuierliche Messung des Glukosespiegels bei Menschen mit Diabetes ab 18 Jahren für bis zu 180 Tage vorgesehen. Das System kann die Messung des Blutzuckers (BZ) an der Fingerbeere zur Entscheidungsfindung für die Diabetestherapie ersetzen. Blutzuckermessungen an der Fingerbeere sind nach wie vor hauptsächlich für die nach Tag 21 einmal täglich durchgeführte Kalibrierung, falls die Messwerte nicht den Symptomen entsprechen oder während der Einnahme von Tetracyklinen erforderlich. Das Einsetzen und die Entnahme des Sensors erfolgen durch einen Arzt. Das Eversense E3 CGM System wird von einem Arzt verordnet; Patienten, die mehr darüber erfahren möchten, sollten sich an ihren Arzt wenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen findest Du unter <https://www.ascensia diabetes.com/eversense/safety-info/>

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring und das Eversense Logo sind Marken von Senseonics, Incorporated. Ascensia und das „Ascensia Diabetes Care“-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu Informationszwecken verwendet. Daraus ist keine Verbindung oder Billigung abzuleiten.



Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH
Marie-Curie-Straße 5
51377 Leverkusen
www.diabetes.ascensia.de

Hergestellt von: Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway · Germantown, MD 20876-7005 USA

ENDLICH FREI MIT DEM EINZIGEN LANGZEITSENSOR FÜR FAST 6 MONATE

So bekommst Du Dein Eversense - Schritt für Schritt



Einfacher starten:
Eversense Team anrufen
und wir machen den Rest: 0800/5088844

1. Ärztliche Verschreibung

Dein Arzt stellt Dir ein Rezept für das Eversense CGM System aus.

2. Anrufen und entspannen

Wie das funktioniert?

Einfach den **Ascensia Diabetes Service – Eversense Team** anrufen und wir gehen mit Dir die nächsten Schritte durch, unterstützen Dich bei anstehenden Entscheidungen und übernehmen z.B. die Organisation Deiner technischen Einweisung in das System.

Unsere speziell geschulten KollegInnen und Kollegen behalten immer den Überblick und führen Dich auf kürzestem Weg zu Deinem Insertionstermin.

Ascensia Diabetes Service

Eversense Team

0800/5088844

(kostenfrei; Mo-Fr 08:00 - 18:00 Uhr)

Folgendes erledigen wir gemeinsam mit Dir:

- Eversense Zentrum auswählen**

Hier findest Du schon vorab eine Übersicht:



Mein Eversense-Zentrum:

- Fachhändler aussuchen und Rezept einlösen**

Dein Rezept muss bei einem kooperierenden Diabetes Fachhändler eingelöst werden.

Hier findest Du eine Übersicht:



Mein Diabetes-Fachhändler:

- Bestätigung der Krankenkasse abwarten**

Der gewählte Fachhändler übernimmt die Kommunikation mit Deiner Krankenkasse. Innerhalb von max. 4 Wochen sendet Dir Deine Krankenkasse die Kostenübernahmebestätigung zu.

Was tun, wenn die Krankenkasse ablehnt?

Wir sind kontinuierlich in Gesprächen mit den Krankenkassen, um die Situation für Dich zu optimieren. Sollte es dennoch einmal nicht klappen, hilft Dir auch hier gerne unser **Eversense Team im Ascensia Diabetes Service** weiter.

- Lieferung des Eversense CGM Systems an Dein Zentrum**

Wir informieren Deinen Diabetes Fachhändler über Deinen Insertionstermin und das von Dir gewählte Eversense Zentrum und koordinieren für Dich die rechtzeitige Lieferung Deines neuen Eversense CGM Systems an das Zentrum.

3. Technische Einweisung und Einsetzen des Sensors


Du erhältst in Deinem Eversense-Zentrum eine technische Einweisung in Dein Eversense CGM System.

Danach bekommst Du Deinen ersten Sensor eingesetzt!

Eine Checkliste für den Einsetz-Tag findest Du auf der Rückseite dieses Flyers.

4. Die neu gewonnene Freiheit genießen!

Solltest Du einmal Unterstützung mit Deinem neuen Eversense benötigen, kontaktiere einfach das Dir bekannte **Eversense Team im Ascensia Diabetes Service** und wir unterstützen Dich gerne!

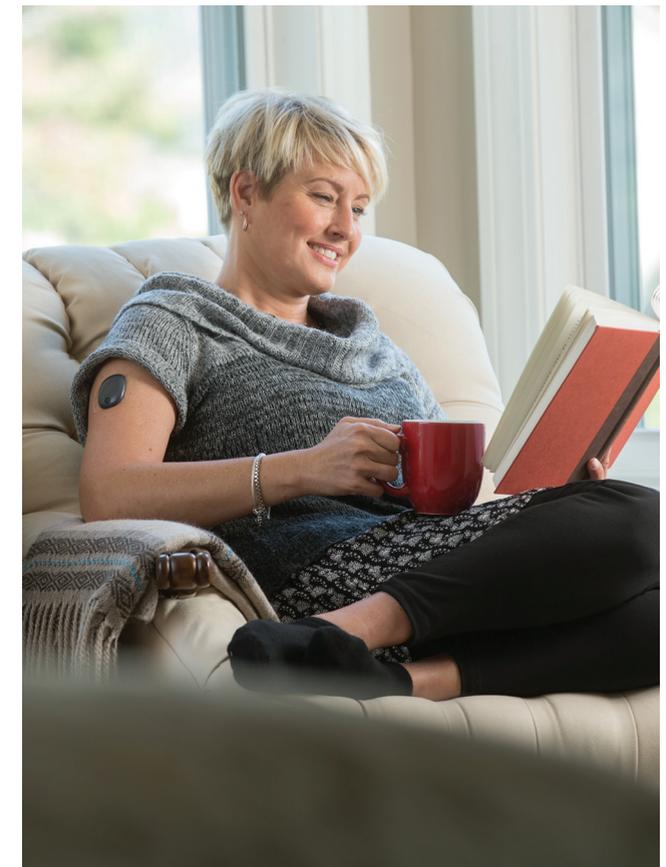

Einfacher starten:

Eversense Team anrufen

und wir machen den Rest: 0800/5088844