

The logo features the word "Kaleido." in a white, bold, sans-serif font. The text is positioned on the right side of the image, set against a background of diagonal stripes in shades of purple, pink, orange, and red. The stripes are parallel and run from the top-left towards the bottom-right, creating a dynamic, geometric pattern.

Kaleido.

Sag hallo zu Kaleido!



Wir sind nicht nur ein Hersteller von Medizinprodukten, sondern viel mehr wie eine Familie für alle, die mit Diabetes leben. Wir wissen, dass Diabetes vielfältig, herausfordernd, und individuell ist. Für die Diabetesbehandlung gibt es keine “Lösung-für-Alle” – warum sollte eine Insulinpumpe es dann sein? Denn was für eine Person funktioniert, muss für eine andere nicht unbedingt die beste Wahl sein.

Hier kommt Kaleido ins Spiel! Kaleido wurde entwickelt, damit du dein Leben so leben kannst, wie du es willst. Wie? Indem wir unsere Produkte individuell und diskret gestalten und so entwickeln, dass sie leicht verständlich und unkompliziert zu bedienen sind.

Unser Ziel? Wir wollen dir eine Insulinpumpe bieten, die perfekt zu deinem Leben passt und dich bestmöglichst unterstützt. Unserer Meinung nach sollte deine Insulinpumpe dir die Freiheit und Flexibilität bieten, die du brauchst, um dein Leben in vollen Zügen zu genießen. Diabetes begleitet dich immer, aber das Leben ist viel mehr als Diabetes.



So funktioniert's!

Wenn du dich für Kaleido entscheidest, erhältst du ein Starter Kit mit zwei kleinen, wiederverwendbaren Pumpen und einem Handset. Selbstverständlich gibt es eine technische Einweisung und einen Kundenservice, der dich unterstützt. Deine Verbrauchsmaterialien wie Ampullen und Infusionssets bekommst du in unseren Top-up Kits - damit deine Insulinpumpentherapie mit Kaleido ohne großen Organisationsaufwand funktioniert.

Kaleido hilft dir dabei, dein Leben so zu leben, wie du es willst

Mach sie zu deiner Kaleido!

Kaleidoer haben Spaß, sind dynamisch und selbstbewusst. Und hey, das ist toll – Wenn wir alle gleich wären, wär's doch auch langweilig, oder?



Fearless



Candy Cane



Fancy Flamingo




Lavender Grove



Gatsby




Ocean

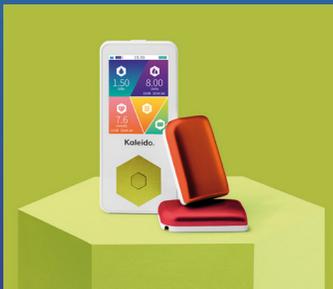

Pumpkin Spice




Cheetah

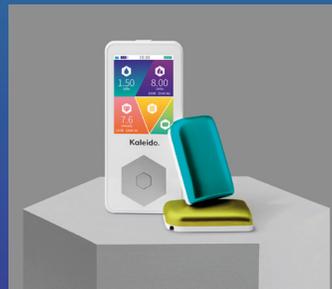

Hummingbird



Black Magic

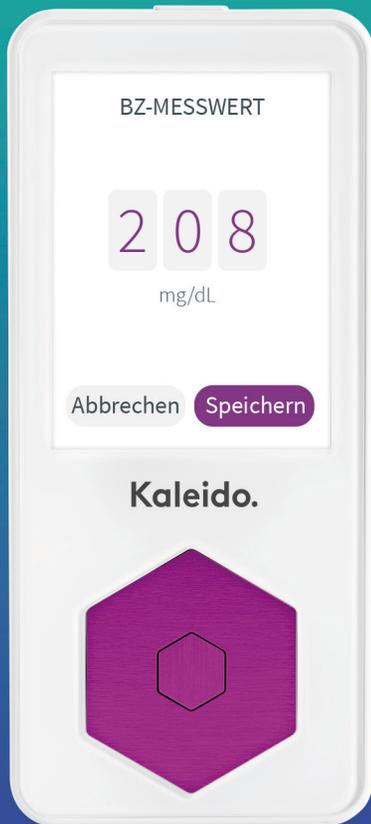

- Trage deine Kaleido wie du es willst: als Patch-Pumpe oder als konventionelle Pumpe! Dank der klitzekleinen Pumpe, der **Schlauchoptionen von 5 und 30 cm** und dem Patch kannst du deine Kaleido stets so tragen, wie du es möchtest. Je nachdem, was du anziehst, oder wozu du gerade Lust hast.
- Unsere 90° Soft-Infusionssets sind in zwei **Kanülenlängen erhältlich – 6 mm und 9 mm**. Noch eine Möglichkeit um es zu deiner Kaleido zu machen! Dank unserer leicht zu bedienenden Setzhilfe wird der Wechsel des Infusionssets ein Kinderspiel!
- Egal, ob du ein CGM-System oder dein Lieblings-Blutzuckermessgerät verwendest: Es ist ganz einfach, deine Glukosewerte in deinem Kaleido-Handset zu speichern.
- Du wählst deine Kleidung passend zu deiner Persönlichkeit aus, warum nicht auch deine Pumpe? Kaleido gibt es in **10 verschiedenen Farbkombinationen**, aus denen du dein Starter Kit wählen kannst.



Wähle deine perfekte Kaleido aus!

Klitzeklein und perfekt geformt

Wir verstehen nicht, warum medizinische Hilfsmittel so... medizinisch aussehen müssen. Kaleido ist eine Pumpe, auf die du stolz sein kannst!

Es geht um dich und deinen Diabetes, und egal ob du Kaleido offen oder lieber unter deiner Kleidung tragen möchtest: Du wirst dich wohlfühlen, selbstsicher sein und unbeschwert deine Tage (und Nächte!) genießen können.





Große Innovation auf kleinstem Raum!

In unsere Pumpen passen 200 Einheiten Insulin, und trotzdem sind sie klein *und* leicht. Sie werden mit dem innovativen Kaleido-Handset über eine gesicherte *Bluetooth*® Low-Energy-Verbindung gesteuert, sodass du deine Insulinpumpe einfach und diskret bedienen kannst. Kaleido ist so klein, du vergisst fast, dass du sie trägst!




Mikro-USB-Anschluss und Lautsprecher

Nutze deine Kaleido, wie DU es willst!

Einfach zu nutzen, zu tragen und zu verstehen

Unsere
Herzensangelegenheit:
Cooles Design kombiniert
mit intuitiver Bedienung.



Insulinpumpen = kompliziert und
lästig? Kaleido will das ändern!
Wir sind hier, damit du *weniger* an
deinen Diabetes denken musst und
mehr Zeit zum Leben hast.

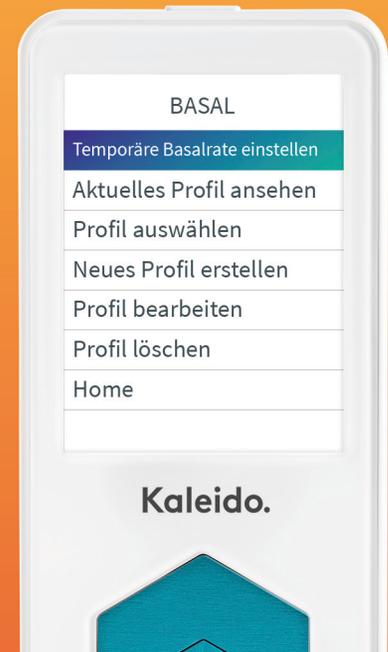

- ✓ Ein leicht zu bedienendes System, ein Startbildschirm, der dir direkt alle wichtigen Informationen zeigt, intuitive Menüs und keine Fachbegriffe.
- ✓ Basalprofile, die einfach einzurichten, zu überprüfen und zu ändern sind.

- ✓ Einfacher Überblick über Verbrauchsmaterialien dank unserer super organisierten Top-up Kits!
- ✓ Einfaches Hochladen von Daten auf diasend®, damit du immer auf dem neuesten Stand bist.

- ✓ Ein hilfreicher Kaleidoculator und kinderleichtes Navigieren.
- ✓ Insulinampullen die ganz einfach zu befüllen sind.

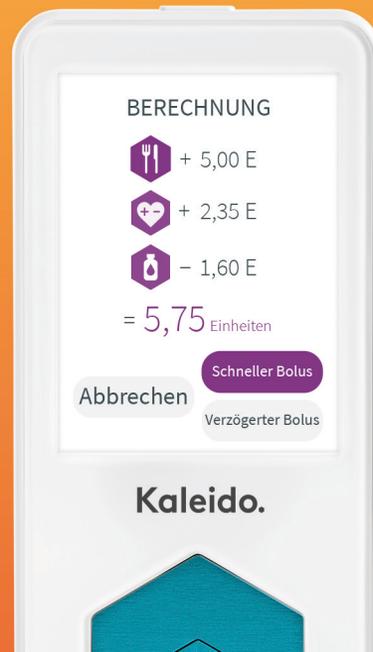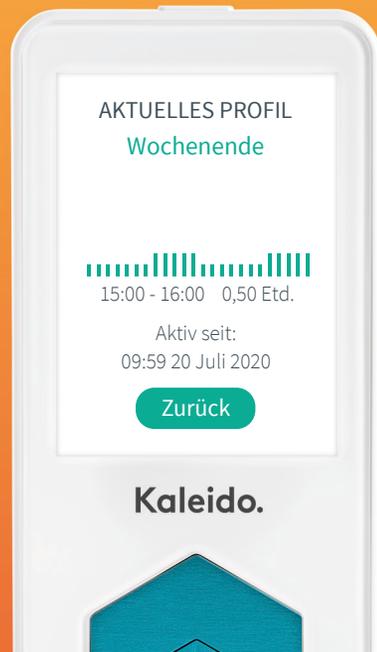

Kaleido ist einfach zu bedienen, leicht zu verstehen und schnell zu erlernen. Der Vorteil? Kaleidoer leben ihr Leben - mit einer Pumpe die sie mögen. *Hurra!*

Weil das Leben schon kompliziert genug ist

Technische Daten von Kaleido

Willst du wissen, was Kaleido alles kann? Hier sind alle Produktspezifikationen

Kaleido®-System

Abmessungen	Pumpe: 50 mm x 35 mm x 12,5 mm Handset: 107 mm x 50 mm x 9 mm Ladestation: 60 mm x 45 mm x 15 mm
Gewicht	Pumpe: 19 g Handset: 60 g Ladestation: 13 g
Akkus	Pumpe: 260 mAh Lithium-Polymer-Akku Handset: 550 mAh Lithium-Polymer-Akku
Farben	Zehn Farbkombinationen
Daten	Das Kaleido Handset kann Daten bis zu 90 Tage speichern, die Daten der letzten 8 Tage werden im Handset angezeigt. Daten können mit einem Uploader eines geeigneten Dritten (z. B. Glooko®) gespeichert werden.
Garantie	4 Jahre
Schutzart	Pumpe: IP68 (staub- und wasserdicht bis zu 1,5 m für bis zu 1 Stunde) Handset: Vor Nässe schützen Ladestation: Vor Nässe schützen

Insulinabgabe

Kapazität der Insulinampulle	Die Insulinampullen haben eine Füllmenge von 200 Einheiten und sind zugelassen für mit dieser Insulinpumpe getestete schnellwirksame U-100 Analog-Insuline. Bitte entnimm die Handelsnamen der Insuline unserem Benutzerhandbuch und besprich das Thema mit deinem Diabetes-Team.
Basal	<ul style="list-style-type: none">• 24 Ein-Stunden-Segmente in jedem Profil• Minimale Basalrate: 0,05 E/Std - Maximale Basalrate: 5 E/Std - Schrittgröße der Basalraten-Einstellung: 0,05 E• Temporäre Basalraten von 0 % bis 200 % der aktuellen Rate, für bis zu 24 Stunden
Bolus	<ul style="list-style-type: none">• Schneller Bolus: Minimale Bolusdosis: 0,05 E - Maximale Bolusdosis: 30 E - Schrittgröße der Bolusdosis-Einstellung: 0,05 E• Verzögerter Bolus: Von 0,05 Einheiten bis 30 Einheiten, von denen mindestens 0,05 Einheiten sofort abgegeben werden. Der Rest wird über einen verzögerten Zeitraum von 0,5 bis 9,5 Stunden in Schritten von 0,5 Stunden abgegeben.
Kaleidoculator	<ul style="list-style-type: none">• Wirkdauer von 2-8 Stunden in 0,5-Stunden-Schritten einstellbar• 24 einstellbare Kohlenhydratfaktoren• 24 einstellbare Korrekturfaktoren• Aktives Insulin berechnet anhand eines linearen Abfalls, der alle Boli einschließt

Sicherheitsfunktionen

Alarm niedriger Priorität	Niedriger Pumpen- oder Handset-Akkustand, niedriger Füllstand der Insulinampulle, Insulinampulle fast abgelaufen, Gerätefehler
Alarm hoher Priorität	Pumpen- oder Handset-Akku leer, Insulinampulle leer, Insulinampulle abgelaufen, Insulinverstopfung, Gerätefehler
Sperrbildschirm	Lege einen Pincode fest, der korrekt eingegeben werden muss, um dein Handset zu entsperren, wenn es eingeschaltet wird oder aus dem Ruhemodus zurückkehrt
Notfallmeldung	Speichere wichtige Kontaktdaten auf deinem Handset, um sie im Notfall an andere weitergeben zu können

Möchtest du uns kennenlernen? Super!

Kontaktiere uns:

E-mail: Kaleidocare.de@hellokaleido.com
Telefon: +49 (0) 32221 096580
Website: hellokaleido.com



Kaleido-Erklärung

Kaleido ist für die kontinuierliche subkutane Abgabe von Insulin konzipiert, für die Behandlung von Menschen mit insulinabhängigem Diabetes mellitus. Die Pumpe gibt programmierbare Basalprofile und programmierte Insulinboli über Infusionssets mit festen und variablen Mengen in das subkutane Gewebe ab. Kaleido ist CE-zertifiziert und in allen teilnehmenden Ländern und Staaten erhältlich.

Kaleido®, Kaleido Care® und ViCentra® sind eingetragene Marken von ViCentra B.V.
Die *Bluetooth*®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch ViCentra B.V. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.
diasend® ist eingetragene Marke von Glooko, Inc.
Facebook und das Facebook-Logo sind eingetragene Marken von Facebook Inc.
TWITTER, TWEET, RETWEET und das Twitter-Logo sind Marken von Twitter, Inc. oder seinen Tochterunternehmen.
Instagram und das Instagram-Symbol sind eingetragene Marken von Instagram LLC.
YouTube und das YouTube-Logo sind eingetragene Marken von Google LLC.



Kaleido.®